

DayClocks

Gebruikershandleiding



DayClocks

Voorwoord

Bedankt voor de aanschaf van uw DayClock! Deze handleiding beschrijft het gebruik van:

- de DayClock met DayClock abonnement
- de DayClock zonder DayClock abonnement

Zie hoofdstuk 2 - Product omschrijving voor meer informatie over het DayClock abonnement.

Deze handleiding beperkt zich tot het beschrijven van het instellingenmenu van de DayClock en hoe u activiteiten, foto's en berichten kunt invoeren. Niet alle functionaliteiten zijn in deze handleiding benoemd. Bezoek onze website voor meer informatie over de functionaliteiten van de DayClock: www.dayclocks.nl. In het hoofdmenu vindt u onder "Wat kan uw DayClock?" de volgende submenu's:

- De functionaliteiten van de DayClock
- De functionaliteiten van de DayClocks app
- Veel gestelde vragen

Deze handleiding is bedoeld voor de gebruiker van de DayClock. Onder de gebruiker wordt de mantelzorger en/of familie van de hulpbehoevende bedoeld die de DayClock beheert.

Gebruik de inhoudsopgave om door de handleiding te navigeren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

DayClocks International B.V.

www.dayclocks.nl

info@dayclocks.nl

Voor vragen of meer informatie over het gebruik van de DayClock, kunt u kijken op onze website: www.dayclocks.nl.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Bedoeld en onbedoeld gebruik	4
1.2	Pictogrammen in deze handleiding	4
2	Product omschrijving	5
2.1	Algemeen	5
2.2	Abonnement	5
3	Voorbereidingen voor gebruik	6
3.1	De DayClock uitpakken	6
3.2	De DayClock klaarmaken voor gebruik	6
3.3	De DayClock inschakelen	8
3.4	De DayClock aansluiten	9
3.5	Abonnement aanvragen	9
4	De DayClock gereed maken	10
4.1	Het instellingenmenu van de DayClock	10
4.2	Algemene instellingen	11
4.3	Instellingen van de klok	14
4.4	Dagdelen aanpassen	17
4.5	Weer	18
4.6	Beeldbellen	19
4.7	Uw instellingen opslaan	22
5	Updates uitvoeren	23
6	Aan de slag met de app	24
6.1	Een activiteit invoeren	24
6.2	Weergave controleren	25
6.3	Het DayClock-instellingenmenu openen via de app	26
7	Garantie	27
8	Disclaimer	27

1 Inleiding

1.1 Bedoeld en onbedoeld gebruik

De DayClock is bedoeld als hulpmiddel voor ouderen, om ze meer grip te geven op het plannen van activiteiten, tijd in het algemeen en het ontvangen van foto's en berichten.

De DayClocks app is bedoeld als hulpmiddel voor familie en vrienden van een DayClock-gebruiker, om van afstand een DayClock te bedienen, activiteiten in te voeren en foto's of berichten te sturen.

De DayClock kan aangesloten worden op verschillende accessoires, bijvoorbeeld speakers. Op de website ziet u welke accessoires hiervoor geschikt zijn.



Zet de DayClock nooit terug naar fabrieksinstellingen! U bent dan het DayClock softwareprogramma kwijt.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding



Voorzichtig

Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Tip

Een tip verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

2 Product omschrijving

2.1 Algemeen

De DayClock is een Plug & Play tablet en is zowel bedienbaar met als zonder DayClock abonnement. De DayClock kan via de DayClock Agenda app en via de DayClock website worden bediend.

Zonder abonnement heeft de DayClock de volgende klokfuncties:

- Weergave tijd
- Weergave dagdeel
- Weergave dag van de week
- Weergave dag van de maand
- Weergave dag van het jaar

Met abonnement heeft de DayClock meer functies, waaronder:

- Activiteiten maken, beheren en weergeven, zowel met de DayClock Agenda app en DayClock website.
- Foto's sturen via de DayClock Agenda app of DayClock website en deze bekijken op de DayClock.
- Voor alle overige features, zie www.dayclocks.nl/functionaliteiten-dayclock/
- Beeldbellen (DayClock 10).

2.2 Abonnement

Bij aankoop van een DayClock ontvangt u een tijdelijk abonnement. Deze kunt u activeren door uw accountgegevens in te voeren. Zie §3.5 voor meer informatie. Met dit abonnement kunt u onbeperkt gebruik maken van alle functies van de DayClock evenals de DayClocks Agenda app. Voor het gebruik van het abonnement is een WiFi-verbinding noodzakelijk.

U krijgt aan het eind van de abonnementsperiode een e-mail met een betalingslink van DayClocks waarmee u het abonnement voor een jaar kunt verlengen.

3 Voorbereidingen voor gebruik

3.1 De DayClock uitpakken

1. Pak het apparaat voorzichtig uit.
2. Controleer de inhoud van de verpakking. De levering bestaat uit:
 - een DayClock tablet
 - een adapter
 - een micro USB kabel
 - een standaard
 - deze handleiding
 - een fotolijst (optioneel bij de DayClock 10)



Tip

Stuur een e-mail naar info@dayclocks.nl als een onderdeel ontbreekt.

3.2 De DayClock klaarmaken voor gebruik



Figuur 1: Startscherm klaarmaken voor gebruik

1. Selecteer je taal (figuur 1).
2. Klik op **WiFi** voor het instellen van de WiFi (figuur 2).
3. Na het instellen, swipe van onderen omhoog om de navigatiebalk te tonen en klik vervolgens op .



Figuur 2: Scherm na configuratie

4. Wacht een paar seconden tot de knop **Verder** verschijnt (figuur 3).



Figuur 3: Scherm na configuratie verder

5. Klik op **Verder**. Nu verschijnt de klok en kun je via instellingen de gebruikersnaam invoeren.

**Tip**

Het versienummer kan afwijken.

3.3 De DayClock inschakelen

**Voorzichtig**

Sluit uw DayClock nog niet aan op de adapter.

1. Houd de aan/uit-schakelaar ingedrukt tot een logo verschijnt om de DayClock te starten.
 2. Wacht vervolgens tot de tijd, datum en dagdeel verschijnen (figuur 4).
-



Figuur 4: Het startscherm van de DayClock

3.4 De DayClock aansluiten

Sluit de DayClock aan m.b.v. de meegeleverde adapter en de micro USB kabel:

1. Steek de adapter met de aangesloten kabel in het stopcontact.
2. Verbind de kleine stekker met uw DayClock door deze **geheel** tegen de behuizing aan te laten sluiten.
3. Plaats de tablet op de meegeleverde standaard.



Tip

U dient de DayClock altijd aangesloten te laten blijven op de adapter. Indien u de DayClock gaat verplaatsen, houd dan rekening met een accuduur van 3 uur.

3.5 Abonnement aanvragen

Om uw DayClock klaar te maken voor het ontvangen van activiteiten, berichten en foto's, zorgt u ervoor dat u het account van uw gratis halfjaarabonnement heeft aangevraagd. Dit kan door te mailen naar info@dayclocks.nl. Vermeld in uw bericht het volgende:

- uw type DayClock (7 of 10)
- de datum waarop u de DayClock heeft aangeschaft
- de locatie waar u de DayClock heeft aangeschaft

4 De DayClock gereed maken

Na de voorbereidingen in hoofdstuk 3 kunt u met de DayClock aan de slag! De datum en tijdweergave zijn al ingesteld. Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de overige instellingen van uw DayClock naar wens aan kunt passen.

4.1 Het instellingenmenu van de DayClock

Om in het instellingenmenu te komen doet u het volgende:


1. Houd enkele seconden een drietal vingers op het scherm zoals in figuur 5 aangegeven tot er een blauwe lijn verschijnt.
2. Laat het scherm na 2 seconden los, zodat het instellingen menu verschijnt.



Figuur 5: Het inschakelen van het instellingenmenu.

Het instellingenmenu bestaat uit vijf hoofdmenu's (figuur 6). Deze hoofdmenu's kunnen stap voor stap doorlopen worden om de DayClock in te stellen. U kunt op elk moment terugkeren naar het startscherm door op < in de menubalk onderin het scherm te drukken.

- A. Algemeen – zie §4.2
- B. Klok – zie §4.3
- C. Dagdeel tijden – zie §4.4
- D. Weer (alleen beschikbaar bij de DayClock 10) – zie §4.5
- E. Extra

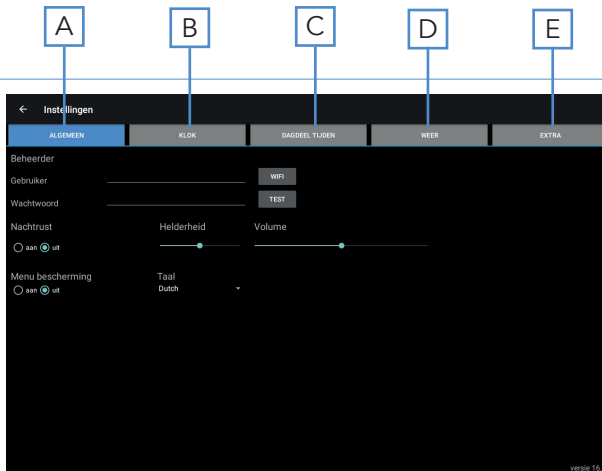

Figuur 6: Instellingenmenu (Algemeen)

4.2 Algemene instellingen

In het algemene instellingenmenu kunnen de belangrijkste instellingen van de DayClock aangepast worden (figuur 6).

4.2.1 Uw account en WiFi-verbinding instellen

1. Druk op **Algemeen (A)**. Het algemene instellingenmenu verschijnt.
2. Druk op **WiFi** en selecteer uw WiFi-netwerk. Wacht tot de verbinding voltooid is.

3. Druk op < in de menubalk onderin het scherm om terug te keren naar het instellingenmenu.
4. Vul onder *Gebruikersnaam* en *Wachtwoord* de gegevens in die u heeft aangevraagd.
5. Druk op **Test** om te controleren of uw account in combinatie met uw WiFi-netwerk geldig is. De melding "geldig" verschijnt indien u de gegevens juist heeft ingevuld.

**Tip**

Wanneer de melding "geldig" niet verschijnt, controleer dan of u uw wachtwoord, gebruikersnaam of WiFi-netwerk niet goed ingevuld heeft.

4.2.2 De optie Nachtrust in-/uitschakelen

De optie Nachtrust is vergelijkbaar met een Stand-by functie. Het scherm van de DayClock schakelt voor een bepaalde tijd uit en wordt zwart.

**Tip**

De synchronisatie functie blijft ingeschakeld. De DayClock blijft via de DayClock Agenda app en DayClock website informatie ophalen (alleen voor abonneementhouders).

Om de optie Nachtrust in of uit te schakelen doet u het volgende:

1. Druk op **Algemeen (A)**. Het algemene instellingenmenu verschijnt.
2. Druk op **aan** of **uit** onder *Nachtrust* om de optie Nachtrust in te stellen.

**Tip**

Houd er rekening mee dat de nachtrustperiode standaard is ingesteld tussen 22:00 en 7:00 uur.

4.2.3 Menubescherming in-/uitschakelen

U kunt een menubescherming inschakelen die ongeoorloofd gebruik van de DayClock onmogelijk maakt.

- Druk op **aan** of **uit** onder *Menu bescherming* om de menubescherming in te stellen.

**Tip**

U kunt de menublokkering uitschakelen door uw DayClock opnieuw op te starten of via de DayClocks Agenda app.

4.2.4 Helderheid en volume aanpassen

De helderheid van het scherm staat standaard ingesteld. Om de helderheid en het volume aan te passen doet u het volgende:

1. Verstel de slider onder *Helderheid* om de helderheid van het scherm aan te passen.
2. Verstel de slider onder *Volume* om het volume van meldingen aan te passen.

4.2.5 Een taal kiezen


Om een taal te kiezen doet u het volgende:

1. Druk op de huidig ingestelde taal onder *Taal*.
2. Selecteer een taal uit het keuzemenu.

4.3 Instellingen van de klok

Om de instellingen van klok op het startscherm aan te passen doet u het volgende:

1. Druk op **Klok (B)**. Het instellingenmenu van de klok verschijnt (figuur 7).

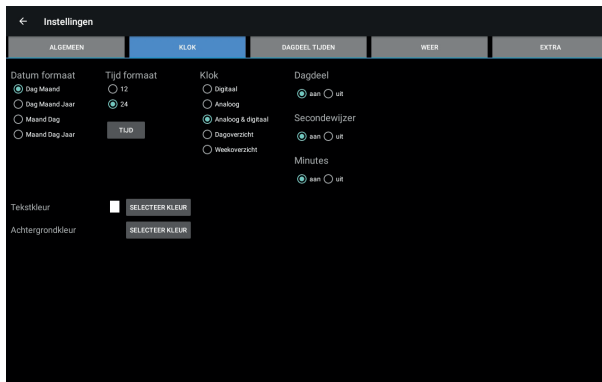

Figuur 7: Instellingenmenu (Klok)

2. Kies onder *Datum formaat* voor de manier waarop de datum wordt weergegeven.
3. Kies onder *Tijd formaat* voor een 12-uurs of een 24-uurs tijdformaat.
4. Kies onder *Klok* voor de manier waarop de klok wordt weergegeven.
5. Schakel de weergave van het dagdeel, de secondewijzer of de minuten aan of uit.

4.3.1 Een tijdszone kiezen


Wanneer u de DayClock buiten de Centraal Europese Tijdzone (CET) gebruikt kunt u de tijdszone wijzigen. Om een andere tijdszone te kiezen doet u het volgende:

1. Druk op **Tijd** onder *Tijd formaat*.
2. Selecteer de tijdszone waarin de DayClock zich bevindt.

4.3.2 Tekstkleur aanpassen

Om de kleuren van de klok in te stellen doet u het volgende:

1. Druk op **Selecteer kleur** achter *Tekstkleur* om de tekstkleur in te stellen. Het kleurselectiemenu verschijnt (figuur 8).

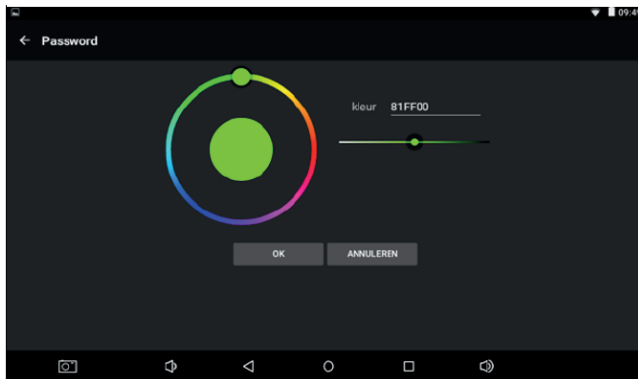

Figuur 8: Instellingenmenu (Klok – kleurselectie)

2. Gebruik de ronde-, of lineaire kleurenschijf om een kleur te kiezen. De standaard tekstkleurcode is wit (FFFFFF).
3. Druk op **OK** om een kleur te selecteren.

4.3.3 Achtergrondkleur aanpassen

1. Druk op **Selecteer kleur** achter *Achtergrondkleur* om de kleur van de achtergrond in te stellen. Het kleurselectiemenu verschijnt (figuur 8).
2. Gebruik de ronde-, of lineaire kleurenschijf om een kleur te kiezen. De standaard achtergrondkleurcode is zwart (000000).
3. Druk op **OK** om een kleur te selecteren.

4.4 Dagdelen aanpassen

In dit menu kunt u de tijden van de dagdelen aanpassen. U kunt geen dagdelen toevoegen of verwijderen. Om de tijden van de dagdelen aan te passen doet u het volgende:

1. Druk op **Dagdeeltijden (C)**. Het instellingenmenu voor dagdeel tijden verschijnt (figuur 9).

	ALGEMEEN	KLOK	DAGDEEL TIJDEN	WEEK	EXTRA
Ochtend		07:00	12:00		
Middag		12:00	18:00		
Avond		18:00	23:00		
Nacht		23:00	07:00		
Nachtrust		22:00	07:00		

Figuur 9: Instellingenmenu (dagdeel tijden)

2. Druk op een tijd om deze aan te passen.




Tip

Zorg dat de dagdelen op elkaar aansluiten.

4.5 Weer (alleen beschikbaar bij de DayClock 10)

In dit menu kunt u de weergave van het weerbericht op het startscherm instellen. Om het weerbericht in te stellen doet u het volgende:

1. Druk op **Weer (D)**. Het instellingenmenu voor het weer verschijnt (figuur 10).

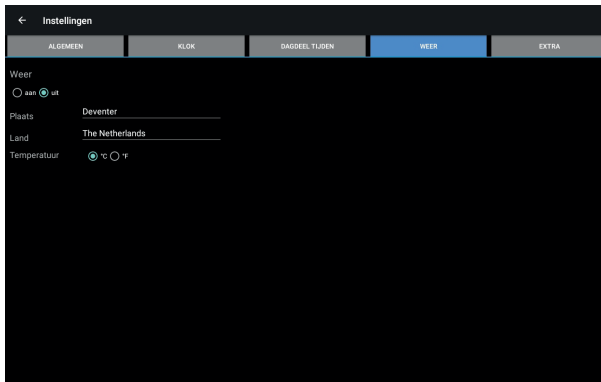

Figuur 10: Instellingenmenu (weer)

2. Zet de weergave van het weerbericht aan of uit.
3. Voer uw huidige plaatsnaam en land in. U dient het land in het Engels in te voeren.
4. Selecteer Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) als weergave van de temperatuur.

4.6 Beeldbellen (alleen beschikbaar bij de DayClock 10)



Om gebruik te kunnen maken van beeldbellen op de DayClock Duo wordt er gebruik gemaakt van:

- de app Google Duo
- een Gmail account van de beheerder(s)
- een Gmail account van de gebruiker
- het DayClock instellingen menu

DayClock (eenmalige instelling)

1. Ga naar het DayClock "Instellingenmenu."
2. Kies **Extra**.
3. Kies **Start Duo**.
4. Configureer Duo met het (bestaande of nieuw aan te maken) Gmail account van de gebruiker.


**Tip**

Wanneer de gebruiker zelf geen mobiel telefoonnummer heeft, kunt u ook gebruik maken van een ander mobiel nummer (dit is slechts voor verificatie tijdens het instellen).

5. Na deze configuratie is de DayClock klaar voor beeldbellen (het duurt een paar minuten totdat het Gmail account zichtbaar wordt bij de Duo van de beheerder).
6. Ga terug naar de klokweergave.


Beeldbellen via de DayClock app

1. Selecteer **Vandaag**.
 2. Selecteer vervolgens de knop **videobellen** in de sectie "Google Duo". De gebruiker ziet nu op de DayClock "U wordt zo gebeld..." (figuur 11).
-

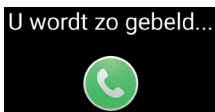

Figuur 11: U wordt zo gebeld

4. De beheerder start vervolgens de Duo app.
5. Start het videogesprek.
Wanneer de gebruiker een eigen telefoonnummer heeft, kunt u in Duo zoeken op het telefoonnummer, anders op het aangemaakte Gmail account van de gebruiker.
6. Laat de gebruiker nu via de blauwe video knop het gesprek opnemen (figuur 12).

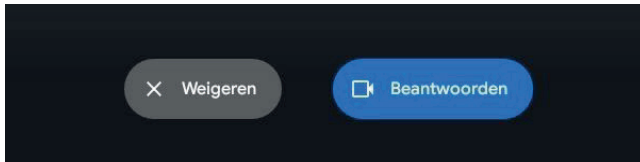


Figuur 12: Scherm gesprek opnemen

7. De beheerder beëindigt het videogesprek in de Duo app.
8. Vervolgens drukt de beheerder in de DayClock app op de **rode knop** bij "Google Duo" en komt de gebruiker vanzelf terug in de klokweergave.


Beeldbellen via het DayClocks Dashboard

1. Selecteer **Vandaag**.
2. Selecteer vervolgens de knop **videobellen** in de sectie "Google Duo". De gebruiker ziet nu op de DayClock "U wordt zo gebeld..." (figuur 13).

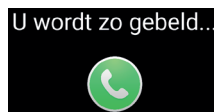

Figuur 13: U wordt zo gebeld

3. De beheerder start vervolgens de Duo app.
4. Start het videogesprek.
Wanneer de gebruiker een eigen telefoonnummer heeft, kunt u in Duo zoeken op het telefoonnummer, anders op het aangemaakte Gmail account van de gebruiker.
5. Laat de gebruiker nu via de blauwe video knop het gesprek opnemen (figuur 14).

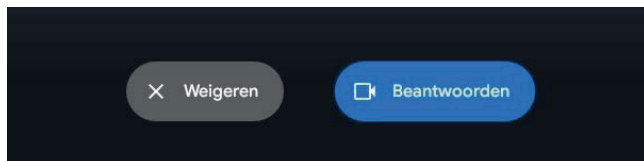

Figuur 14: Scherm gesprek opnemen

6. De beheerder beëindigt het videogesprek in de Duo app.
 7. Vervolgens drukt de beheerder in de DayClock app op de **rode knop** bij "Google Duo" en komt de gebruiker vanzelf terug in de klokweergave.
-

Tip



Indien u nog niet bekend bent met Google Duo adviseren wij u deze app (die overigens zeer eenvoudig is) eerst zelf te downloaden en uit te proberen. Voor het gebruik van Google Duo zelf, wordt namelijk geen ondersteuning verleend.

Tip



Wanneer u de DayClock installeert bij de gebruiker test u dan gelijk op locatie het beeldbellen uit.

4.7 Uw instellingen opslaan

Druk op < in de menubalk onderin het scherm om uw keuzes te bevestigen. Geef uw DayClock de tijd om gegevens op te halen. U keert vanzelf terug naar het startscherm. Uw DayClock is nu gereed voor het ontvangen van activiteiten, berichten en foto's.

5 Updates uitvoeren

De software van de DayClock is heel eenvoudig. U herstart DayClock en wanneer er een update beschikbaar is, krijgt u de volgende melding (figuur 15):



Figuur 15: Startscherm software update

De update wordt nu geïnstalleerd en na afloop krijgt u onderaan het scherm (figuur 16) te zien:



Figuur 16: Scherm update geïnstalleerd

Selecteer nu **Clock** en **Altijd**.

In het geval u deze dialoog niet te zien krijgt, swiipe van onderen omhoog om de navigatiebalk te tonen en klik nu op **O**. De klok wordt nu weer zichtbaar.

6 Aan de slag met de app

De DayClocks Agenda app kan gebruikt worden om van afstand een DayClock te bedienen, activiteiten in te voeren en foto's of berichten te sturen.



Figuur 17: Een bericht en foto zoals weergegeven op de DayClock.

6.1 Een activiteit invoeren

U kunt een activiteit inplannen via de DayClocks Agenda app of via de DayClock website. U dient in het bezit te zijn van een DayClock met een DayClock abonnement. Om met uw smartphone een activiteit in te kunnen voeren dient u de DayClocks Agenda app te installeren:

1. Download en installeer de app *DayClocks Agenda* via Google Play (Android) of de App Store (iOS).
 2. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en bewaar deze gegevens.
-



Tip

Gebruik geen zelf aangemaakt account. Dit is alleen geschikt voor demo doeleinden en werkt niet samen met de DayClock.

Wanneer u de app heeft geïnstalleerd en bent ingelogd kunt u een activiteit toevoegen:

1. Druk op **Activiteiten** in de menubalk onderin het scherm om naar het Activiteitenmenu te gaan.
2. Druk op het **+** symbool en vervolgens op het bovenste Activiteitsymbool om een nieuwe activiteit aan te maken.
3. Voeg onder *Activiteit* een beschrijving toe en stel de volgende instellingen in:
 - Starttijd en datum
 - Eindtijd en datum
 - Herhaling (optioneel)
 - Achtergrondkleur (optioneel)
 - Spraak/geluid toevoegen (optioneel)
 - Foto toevoegen (optioneel)
4. Druk op **Bewaar** om de activiteit op te slaan.
Uw bericht wordt binnen 1 minuut naar de DayClock verzonden en zal voor de gebruiker verschijnen op de datum en tijd die u heeft geselecteerd (figuur 15).

**Tip**

Sleep een activiteit naar links om deze te verwijderen.

6.2 Weergave controleren

U kunt de schermweergave van DayClock met uw smartphone bekijken. Zo kunt u bijvoorbeeld controleren of de DayClock met WiFi is verbonden:

1. Druk op **Vandaag** in de menubalk onderin het scherm.
2. Druk op **DAYCLOCK**. U krijgt nu de actuele schermweergave van de DayClock te zien.

6.3 Het DayClock-instellingenmenu openen via de app

U kunt het Instellingenmenu van uw DayClock ook openen met behulp van de app:



Tip

Deze optie is alleen zinvol wanneer u bij de DayClock aanwezig bent. Het scherm van het instellingenmenu van de DayClock is op afstand namelijk niet te zien.

1. Druk op **Meer** en dan op **Afstandsbediening** in de menubalk onderin het scherm.
 2. Druk op **Instellingen** en vervolgens nogmaals op **Instellingen**.
Het Instellingenmenu op uw DayClock wordt nu geopend, waarna u de mogelijkheid heeft om instellingen te wijzigen. Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over het Instellingenmenu.
 3. Druk op < (DayClock) of op **Klok** (app) om het instellingenmenu te sluiten.
-



Tip

Ga naar www.dayclocks.nl/functionaliteiten-dayclocks-app/ voor een uitgebreide instructie en meer functies van de app.

7 Garantie

1. Dayclocks houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die gelden voor garantie.
2. De klant kan alleen garantie claimen bij Dayclocks wanneer het product is aangekocht bij Dayclocks of een erkende wederverkoper van Dayclocks.
3. De garantietermijn vangt aan op de datum van aankoop.
4. Dayclocks verleent geen garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage.
5. Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het defect veroorzaakt wordt door illegale of onjuiste installatie van software, is garantie uitgesloten.
6. Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van Dayclocks is.
7. Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie.

8 Disclaimer

De leverancier is niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door het onjuist behandelen of niet naleven van de veiligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen is de garantie nietig.

DayClocks Services

Singel 12C
7411 HV Deventer

www.dayclocks.nl
info@dayclocks.nl



DayClocks