




Installatiehandleiding Memory Lane (ML) Zorgscherm




Opstartscherm;

Dit scherm zie je als het Zorgscherm opgestart wordt. Na het laden gaat deze automatisch door naar het volgende scherm van het installatieproces.

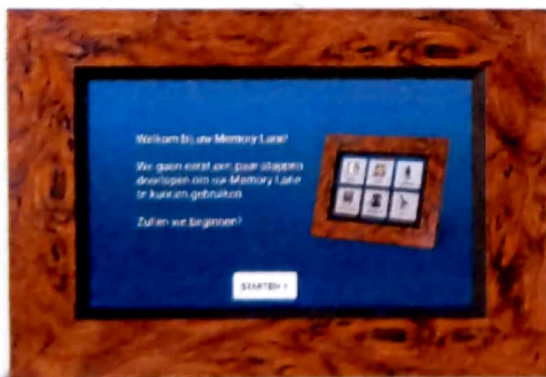

1. Startscherm

De opstartprocedure is geladen en installatie kan beginnen.

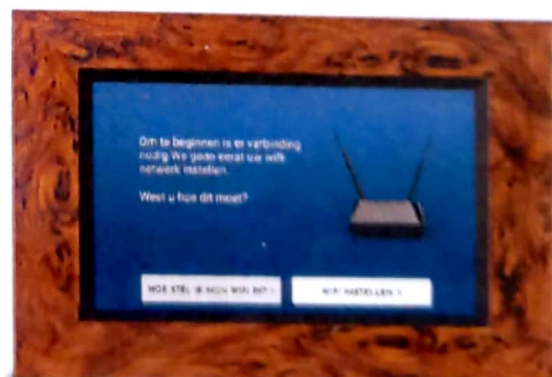

2. Bekend met Draadloos netwerk (Wifi) instellen?


Voor het opstarten van het Zorgscherm is een draadloze verbinding nodig. In de volgende schermen gaan we die instellen.



3. Draadloos netwerk verbinden.

In dit scherm wordt uitgelegd welke stappen je gaat doorlopen voor verbinden met het eigen draadloze Netwerk.

Als je niet weet hoe dit moet, als je de naam van het draadloos netwerk niet weet of het wachtwoord niet hebt, vraag dit dan aan een familielid of vraag deze op bij uw internet provider.

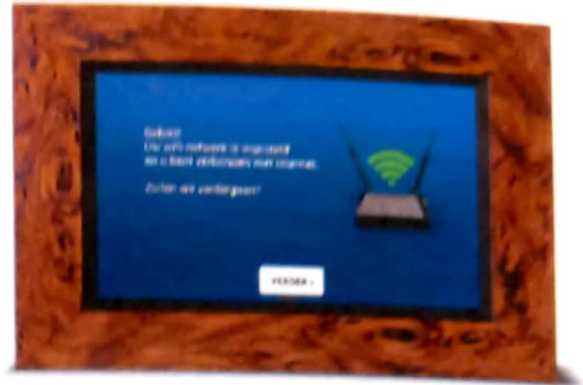


4. Succesvol verbonden

Succesvol verbonden, je ziet dit scherm. Niet verbonden, probeer opnieuw.

5. De Memory Lane heeft persoonlijke gegevens nodig voor optimaal gebruik.

6. Na akkoord van de standaard eindgebruikers licentie ga verder met de installatie.

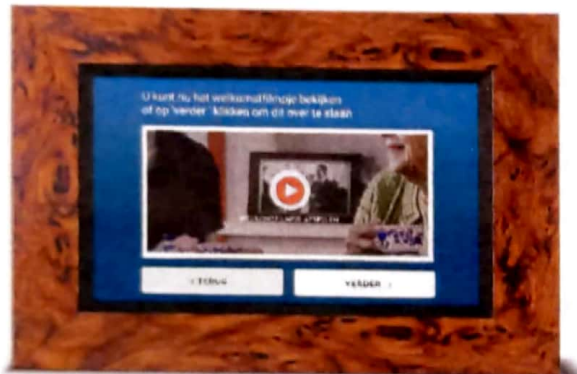

7. Een uitleg in 2 minuten. Kort filmpje waarin functies van de Memory Lane en de Memory Lane App worden uitgelegd.



8. Uw Memory Lane Zorgscherm activeren.

A: Indien de Memory Lane app reeds is geïnstalleerd drukt u op "Ja is aanwezig" en ga door naar punt 9.

B: Indien de Memory Lane app **niet** aanwezig is, volg dan eerst de stappen "Installatie Memory Lane App".



9. Koppel de Memory Lane App aan het Zorgscherm

Druk eerst op frame activeren, Scan de QR code op het zorgscherm.

10. Geef het zorgscherm een naam



(van de gebruiker waar het zorgscherm staat), vul de gebruikers gegevens in en druk hierna op aanmaken.

Het Zorgscherm is nu geactiveerd en gekoppeld aan uw Memory Lane App.

Extra - Alleen voor online abonnementen.

Indien het abonnement **online is besteld** dan volgt er nog 1 stap extra.

Het Zorgscherm vraagt dan om een verificatie code

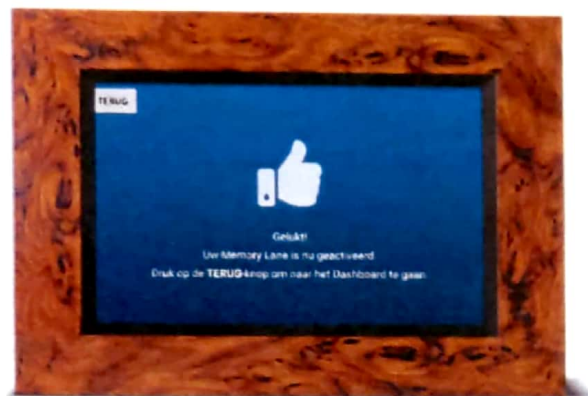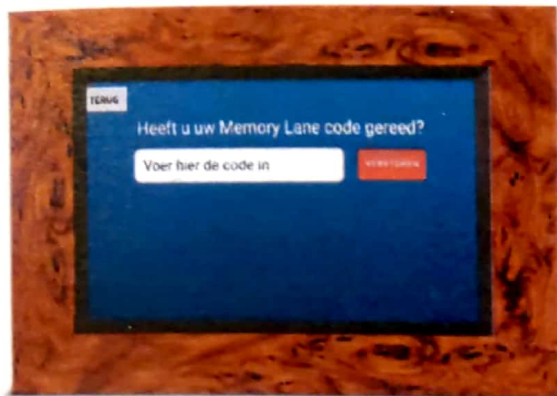

1- Verificatie code invoeren





a- Bij het afsluiten van het online abonnement is er per mail een "verificatie code" gestuurd. Deze code voert u in het Zorgscherm in en drukt op versturen.

b- Deze code niet ontvangen? Kijk dan voor de zekerheid even in de mailbox met ongewenste mail (SPAM)

Vervolg de stappen en bevestig met volgende. Hierna bent u direct gekoppeld aan het zorgscherm.

Installatie Memory Lane App

De Memory Lane App installeren op uw mobiele telefoon kunt u doen door deze App te downloaden in de Google Play Store bij Android of in de Apple Store voor iOS.

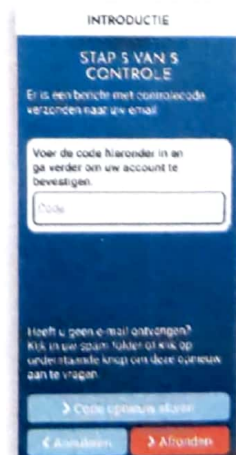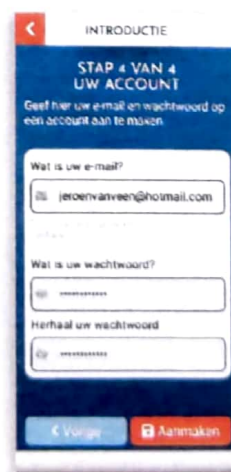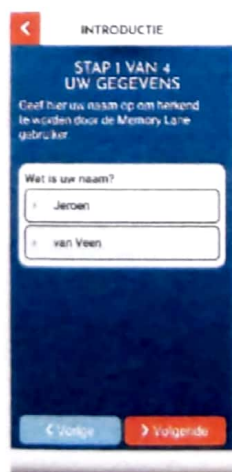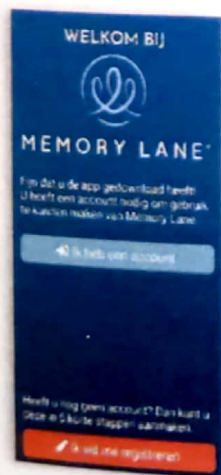

1. **Open na downloaden de App.**
Kies; Ik wil me registreren, onderaan het scherm.

2. **Druk op beginnen en volg de stappen, na elke stap druk op volgende.**

3. **Bij de laatste stap vraagt de Memory Lane App om een code.**

Deze is naar uw email adres verstuurd. Open uw mail om de code te raadplegen en vul deze bij de laatste stap in en druk op afronden.

Uw Memory lane App account is nu aangemaakt.

Memory Lane App gebruiker toevoegen

Wilt u meerdere App gebruikers koppelen dan kunt u onderstaande stappen volgen. De beheerder van het ZorgScherf is degene die als eerste de Memory Lane App heeft gedownload en geïnstalleerd op zijn of haar telefoon, en de configuratie van het Zorgscherf heeft verzorgd. De beheerder is gekoppeld aan het ZorgScherf en kan andere Memory Lane App gebruiker(s) toevoegen door de volgende stappen te doorlopen:

1. Ga naar de Memory Lane App.
2. Druk op het icoon Memory Lane.
3. Druk in het vervolgscherf op Relatie Beheer.
4. Druk onderaan het scherm op Uitnodiging sturen.
5. Druk op rol (boven in het scherm) om aan te geven wat de connectie is.


Nu zijn er 2 mogelijkheden;

A – Nieuwe Memory Lane App gebruiker(s) is in de buurt.

B – Nieuwe Memory Lane App gebruiker(s) niet in de buurt.

- A1.** Nieuwe Memory Lane App gebruiker is in de buurt. De getoonde QR-code kan gescand worden door de nieuwe App gebruiker(s), nadat deze de Memory Lane App heeft gedownload en zich geregistreerd heeft.

- A2.** De nieuwe gebruiker vindt in het openingsscherf, rechtsboven aan het menu. Door op het menu te drukken volgen er een aantal opties, waaronder "scan uitnodiging", door hier op te drukken wordt uw camera geactiveerd en kunt u de getoonde QR-code scannen. Hiermee krijgt u verbinding met het ZorgScherf en bent u deelnemer in de familie cirkel rondom het Zorgscherf.
- B1.** De nieuwe App gebruiker niet in de buurt. Aan de nieuwe App gebruiker kan de QR-code ook gemaild worden. Dit kan de beheerder doen door in zijn App via het icoon Memory Lane naar uitnodigen te gaan. Daar vult u het email adres in van de nieuwe App gebruiker.
- B2.** De nieuwe gebruiker vindt na het downloaden en registreren rechtsbovenaan het menu. Door op het menu te drukken volgen er een aantal opties, waaronder scan QR-codes. Door hier op te drukken wordt uw camera geactiveerd en kunt u de getoonde QR-code scannen in de ontvangen mail uitnodiging. Na het scannen van de QR code is de nieuwe App gebruiker zichtbaar op het ZorgScherf en deelnemer in de familie cirkel rondom het Zorgscherf.

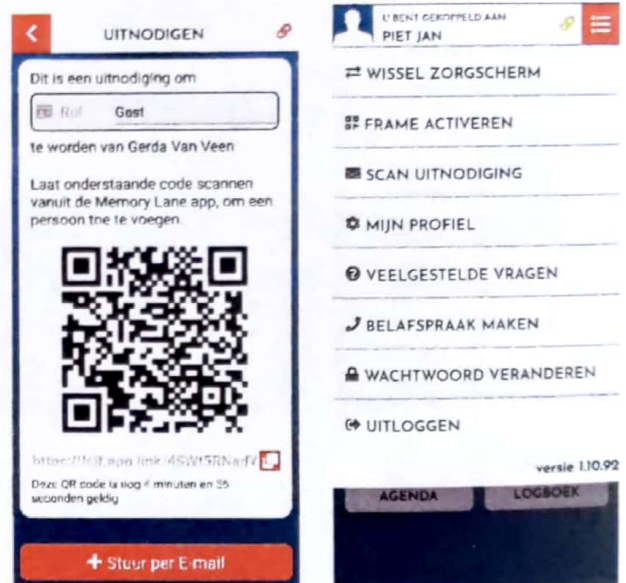

Veel plezier met de Memory Lane.
Meer informatie op <https://mymemorylane.com/helpcentrum>

