



[www.druppelzorg.nl](http://www.druppelzorg.nl)

Let voor gebruik van de Druppelbril op de volgende zaken:

- Volg altijd de aanwijzing van uw specialist
- Gebruik de Druppelbril alleen voor het druppelen van uw ogen met de daarvoor geschikte oogdruppels
- De Druppelbril is niet te gebruiken als veiligheids-, zichtsverbetering-, zonbeschermings- of correctiebril
- De Druppelbril is niet geschikt voor Minims en ooggel

#### Handleiding

1. Was uw handen
2. Plaats het doseerflesje of -flacon in een passende opening van de bril, zodat het stevig vastzit
3. Zet de bril op
4. Buig uw hoofd achterover, zodanig dat het doseerflesje verticaal boven uw oog zit
5. Houd met een hand uw oog open
6. Doseer met uw andere hand de druppels door in het flesje te knijpen
7. Na gebruik uw bril afspoelen met water, alcohol en/of een desinfecterend middel en drogen met een schone doek

Druppelzorg B.V.  
Oostzijde 219  
1502BD Zaandam  
[Info@druppelzorg.nl](mailto:Info@druppelzorg.nl)

CE